

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód (mikrobiológia)	Mintavevő	Mintatípus	Eltarthatóság			Mintaelőkészítés/tájékoztató
					Szobahő	4-8° C	-20°C	
SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR	covpcr	80	Prep-rapid vagy PCR mintavevő	orr- és garattörlet		24-48 óra		Mikrobiológia sorszámon rögzíteni!
Bordetella Pertusis PCR (szamárköhögés)	borpcr	101	Prep-rapid vagy PCR mintavevő	orr- és garattörlet		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni!
Chlamydia trachomatis PCR	chtPCR	81	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum húgycső glans garattörlet vizelet ejakulátum fekély conjunctiva		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae*	garPCR	89	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni!
Herpes simplex (HSV) PCR*	herPCR	88	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus húgycső glans garattörlet		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről származó hólyagos/fekélyes elváltozásból vett minta szükséges.
Mycoplasma genitalium PCR* (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással)	mygPCR	84	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód (mikrobiológia)	Mintavevő	Mintatípus	Eltarthatóság			Mintaelőkészítés/tájékoztatás
					Szobahő	4-8° C	-20°C	
Mycoplasma hominis PCR*	myhPCR	83	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Neisseria gonorrhoeae PCR*	neiPCR	82	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum húgycső garattörlet vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Parvovírus B19	parPCR	100	EDTA-s cső (lila)	EDTA teljes vér		5 nap	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni!
Treponema pallidum PCR	trePCR	87	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum glans garattörlet fekély		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről származó hólyagos/fekélyes elváltozásból vett minta szükséges.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód (mikrobiológia)	Mintavevő	Mintatípus	Eltarthatóság			Mintaelőkészítés/tájékoztatás
					Szobahő	4-8° C	-20°C	
Trichomonas vaginalis PCR	triPCR	86	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Ureaplasma complex PCR*	urePCR	85	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2)	STD2	92	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum glans garattörlet fekély		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről származó hólyagos/fekélyes elváltozásból vett minta szükséges.
Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis)	STDbov	93	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum glans garattörlet fekély		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről származó hólyagos/fekélyes elváltozásból vett minta szükséges.
Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis)	STD5	96	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód (mikrobiológia)	Mintavevő	Mintatípus	Eltarthatóság			Mintaelőkészítés/tájékoztatás
					Szobahő	4-8° C	-20°C	
Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae)	STD4	95	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium)	STD3	94	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni!
Cervicitis panel (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	STDcer	97	Prep-rapid mintavevő	hüvely cervix anus rectum húgycső vizelet ejakulátum		72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! Férfiak esetében küldhető első sugár vizelet és ejakulátum minta, normál vizeletes pohárban (nem borsavas), de az eltarthatósága ez esetben módosul, hűtve 24 óra. 24 órán túl fagyaszttva tárolandó!
Aptima mRNS HPV	ahpvsz	102	cervikális mintavevő	cervix	60 nap	60 nap	24 hónap	
Aptima mRNS HPV	ahpvsz	102	Hologic Thinprep mintavevő	anus rectum húgycső glans	30 nap			
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással)	hvp21	90	Prep-rapid mintavevő	cervix anus rectum húgycső glans garattörlet	72 óra	72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről kefése mintavevővel vett sejtűs minta szükséges

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód (mikrobiológia)	Mintavevő	Mintatípus	Eltarthatóság			Mintaelőkészítés/tájékoztatás
					Szobahő	4-8° C	-20°C	
HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással)	hvp15	91	Prep-rapid mintavevő	cervix anus rectum húgycső glans garattörlet	72 óra	72 óra	3 hónap	Mikrobiológia sorszámon rögzíteni! A felsorolt anatómiai területről keféssal mintavevővel vett sejtdús minta szükséges

Kiadás dátuma: 2025. 05. 19_v5